

## Le support de tête de vache VINK

Cet instrument permet de contenir le museau de l'animal en hauteur parallèle au corps. Immobilisé dans cette position, il est aisé de faire déglutir sans pertes les produits nécessaires aux soins du type liquides nutritionnels, bolus antiparasitaires, aimants stomacaux ou vérification d'identité sanitaire précise de la boucle à l'oreille des vaches laitières, ce travail étant exécuté sans peine par un seul intervenant.

**COMPOSITION:** Le support de tête Vink est constitué d'une armature tubulaire métallique à l'intérieur de laquelle est fixée une large gouttière.


### SECURITE:

- Le support de vache s'utilise sur laitières écornées.
- L'appareil est développé pour le traitement des vaches laitières.

**ASSEMBLAGE (voir croquis):** Placer la gouttière dans l'encadrement métallique. Serrer les deux écrous sur le cadre puis positionner la gouttière. Mettre les autres écrous freins sans les bloquer pour permettre d'actionner le levier. Introduire les deux crochets supérieurs jusqu'à encliquetage du ressort muni d'un ergot.

**MODE D'EMPLOI:** Prendre les vaches laitières écornées dans une mangeoire équipée de cornadis auto-bloquants ou à verrouillage collectif manuel. Passer le cadre du support de tête individuellement sur la vache qui nécessite une intervention.

L'appareil s'accroche de bas en haut au-dessus de la tête de la vache sur le premier tube latéral du montant cornadis. Le positionnement est facilité lorsque la vache se décontracte et s'avance franchement côté mangeoire; l'intervenant choisira le moment opportun. La tête est relevée avec le levier à l'inclinaison désirée puis fixée avec la chaînette. L'opérateur applique les soins en toute quiétude et efficacité.

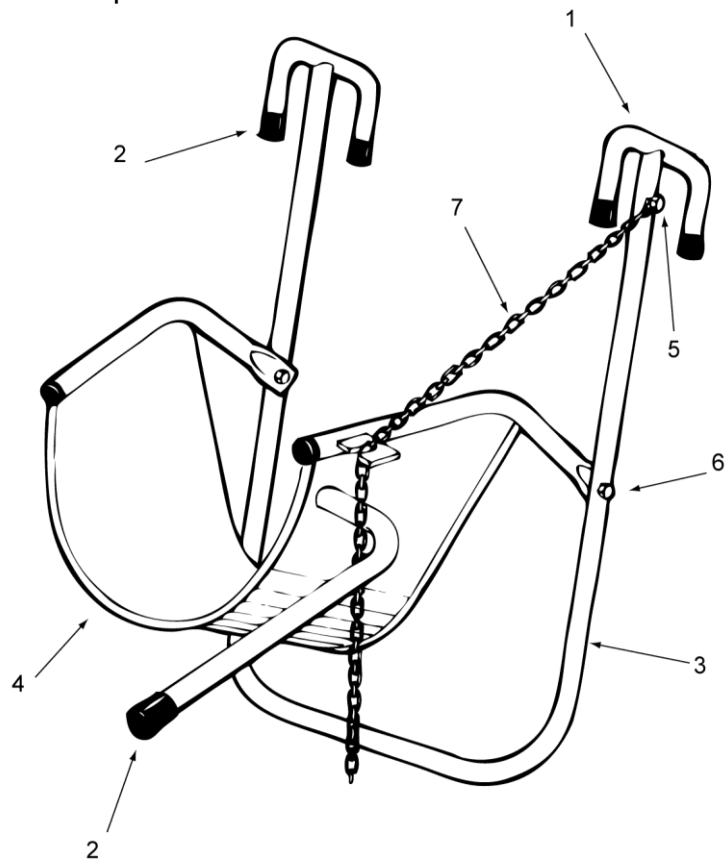

### Pièces (détachées):

1. Crochets
2. Embout nylon 27 mm
3. Armature
4. Support
5. Fixation pour chaîne
6. Fixation pour armature
7. Chaîne