

Gebruiksaanwijzing Hoefbekapbeugel

Voorwoord

Met de Vink hoefbekapbeugel creëert u een makkelijk te gebruiken bekapbox, waardoor direct hoefgebreen aan de achterpoten behandeld kunnen worden. Bij het ontbreken van een gemakkelijk te gebruiken bekapbox worden behandelingen vaak uitgesteld. Daardoor komt het regelmatig voor dat dieren moeten worden opgeruimd vanwege kreupelheid, die bij tijdige behandeling genezen hadden kunnen worden.

De Vink hoefbekapbeugel is op elk type ligboxafscheiding in de loopstal te bevestigen. De koe wordt behandeld in haar vertrouwde omgeving op een makkelijk te bereiken plaats. De hoefbekapbeugel is voorzien van een zelfremmende veiligheidslier, volledig verzinkt en wordt compleet met bevestigings materiaal, touw en hakband geleverd

Monteren in de stal

- Zoek een plaats die makkelijk toegankelijk is bijvoorbeeld in de nabijheid van de melkstal.
- Schroef de bijgeleverde parallelklemmen aan de achterzijde van de boxafscheiding zowel links als rechts zodanig dat de klemmen los zitten en de buis van de hoefbekapbeugel er nog ingeschoven kan worden.(zie foto 1) Met de bevestiging van de terugloopketting naar de voorkant gericht, het plaatje met de open sleuf aan de rechter kant en aan de linkerkant het plaatje met de gesloten sleuf(zie foto 1). Beide plaatjes aan de binnen/boven kant van de beugel.
- Schuif de hoefbekapbeugel in elkaar zoals op foto 2 (**Alleen bij de deelbare hoefbekapbeugel**).
- Plaats de bekapbeugel op de boxafscheiding met de zwengel aan de rechter kant en schuif de klemmen over de uiteinden van de buis
- Schuif de bekapbeugel naar achteren zodanig dat de bocht van de boxafscheiding gelijk zit met de bocht van de bekapbeugel (Zie foto 3)
- Draai vervolgens de 4 M12 bouten aan (sleutel 19).
- Maak de terugloopketting met de borgclip vast aan de linkerkant van de box
- De bekapbeugel is nu klaar voor gebruik

Voor zwevende ligboxafscheidingen zijn speciale ondersteuning sets verkrijgbaar waardoor de box niet doorhangt

De diameter van de buis van boxafscheiding bepaalt welke parallelklemmen men moet gebruiken 1,5" of 2"

De beugel past op ligboxafscheidingen variërend in breedte van 105 cm tot 125 cm

Veiligheidsvoorschriften

- De veiligheidslier werkt alleen als men bij het optakelen van de poot met de klok mee draait en omlaag tegen de klok in.
- sluit de_koe altijd op met de terugloopketting
- wees bedacht op onverwachte bewegingen van de koe

Gebruik van de hoefbekapbeugel

- Zet de te behandelende koe vast in de box.
- Sluit de koe op met de terugloopketting.
- Doe de band net boven de hak van het dier.
- Maak de hakband met de karabijnhaak aan het hijskoord vast.
- Nu kun je de achterpoot optakelen door de zwengel met de klok mee te draaien.

Reparatie

Vervangen van het hijskoord

Wikkel de lier in zijn geheel af en demonteer de klem waar het hijskoord mee vast zit. Monteer het nieuwe hijskoord en draai de lier met de klok mee op

Lagers en of lier vervangen

Verwijder het hijskoord, demonteer de lier door middel van het verwijderen van de bevestiging (nr. 26). Sla de nylon lagers uit de ondersteuning en sla de nieuwe er in . Schuif de lier door de lagers en draai de bevestiging weer vast

Vervangen van de zwengel

Verwijder de 2 m6 boutjes (sleutel 10) aan de voorkant van de lier. Om de nieuwe zwengel te monteren moet men de bus waar de zwengel in valt in zijn geheel naar *links* draaien. Plaats de nieuwe zwengel, het borg plaatje en monteer de 2 M 6 boutjes. Draai de boutjes handvast en daarna een kwartslag terug, zodat ze vrij kunnen bewegen in de sleufjes en buig het borgplaatje om de kop van de boutjes zodat de boutjes niet meer los kunnen lopen

Onderdelen

5	Zwengel	HBB05
6	Handvat	HBB06
7	Ketting	HBB07
8	Borgpen	HBB08
9	Veer aan hijskoord	HBB09
11	Lageras ondersteuning	HBB11
15	Frame Hoefbekapbeugel	HBB15
22	Liertje	HBBL03
24	Hijskoord	HBBK
25	Hijsband	HBBB
26	Bevestiging liertje	HBB26
27	Montageset 1,5"	HBBM1
29	Montageset 2"	HBBM2
30	ketting plaatje (set)	HBB30

Neem bij twijfel over de werking contact op met de fabrikant of uw dealer.